


データ保存方法: Voluson PC Format

★Archive画面より Patient / Exam / Image毎に画像をPC Formatでメディアに保存することが出来ます。


★メディアは CD・DVD-R・DVD-RW・DVD+R・DVD+RW・USBメモリを使用出来ます。

1. Archiveキー  を押して下さい。

2. 患者リストより対象の患者名 / Examリストより対象のExam / 対象の画像を選択して下さい。

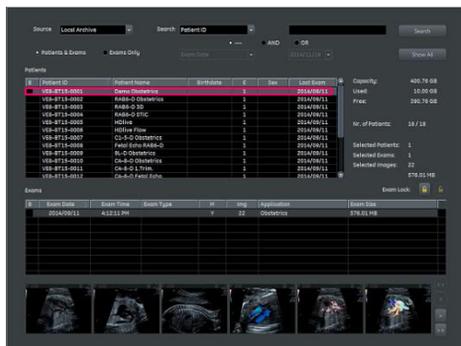

患者さん毎

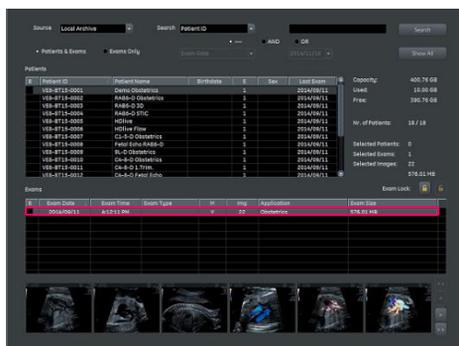

Exam毎



Image毎

3. 画面右側ソフトメニューより [Export]を選択して下さい。



4.[Export]Windowが表示します。




5.[Save in]でメディアを選択して下さい。

6.[File Name]

[IMG_YYYYMMDD_No]と、年月日を元に自動的にファイル名が発行されます。
必要に応じてFile名を入力して下さい。

7.[Save as Type] をプルダウンするとメニューが表示します。


8.[PC/Mac Format Files (*.jpg, *.mp4)]を選択して下さい。

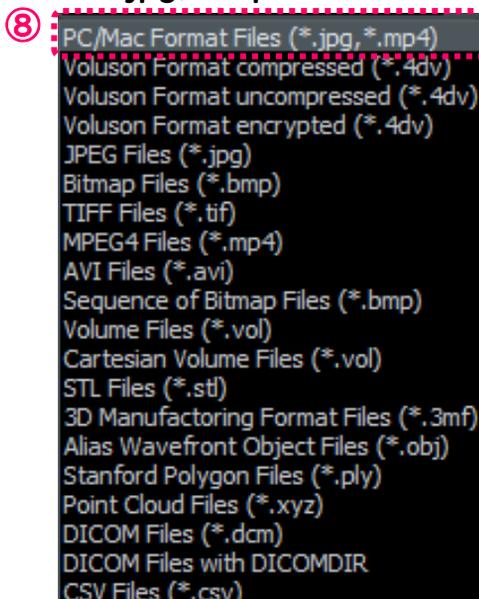


9.[Save]を選択して下さい。

Folder作成

[Create Patient/Exam Folders] にチェックを入れると Folderを自動作成し Folder名が [ID_PT Name]となります。 複数のExamがあるPT IDを選択時には 検査年月日ごとにFolderを作成します。

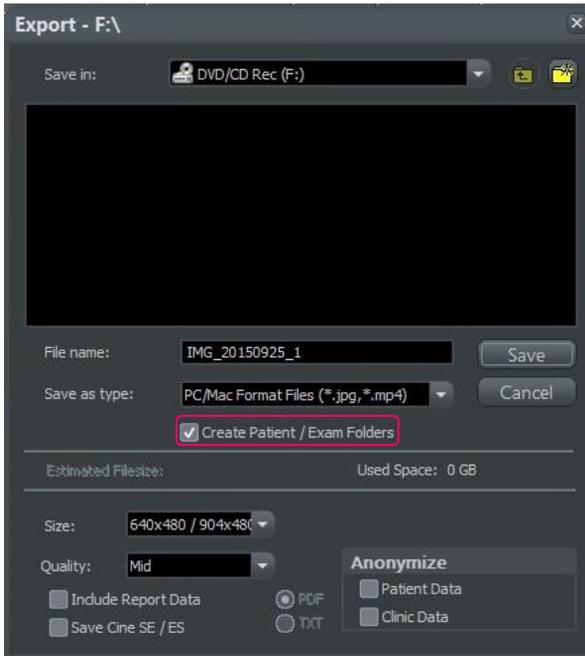


1]PT ID_PT Name

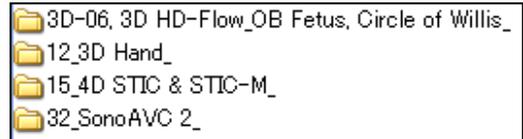


Folderの中に

2]検査年月日_時刻のFolderが作成します。 YYYYMMDD_HHMMSS

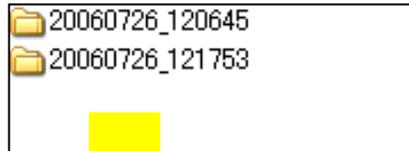

Folderの中に


3]各画像は[File Name]で入力した名称 になります。

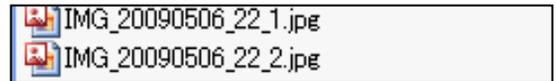

Anonymize


チェックを入れている場合、[Patient Data] [Clinic Data]を非表示で PC FormatのFileを作成します。

[Patient Data]にチェックを入れている場合: ID/Nameは非表示でGAIは表示します。

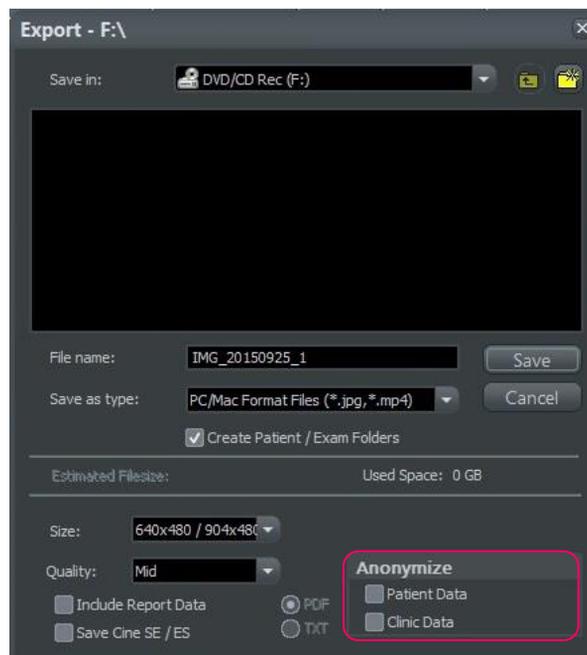

動画像の圧縮と表示サイズ

- [Size]: 動画像出力時の画像サイズを選択します。
 (Original: 本体上と同じドット数で出力します。)
- [Quality]: 圧縮のレベルを選択できます。

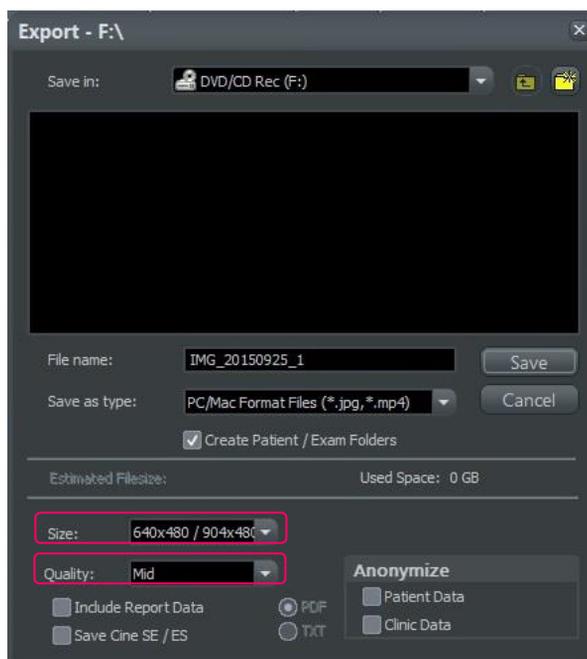

動画再生方向の設定

Save Cine SE/ES]にチェックを入れた場合:

動画像の[開始→終了→開始]を1つの動画像Fileとして構築します。

チェック無しの場合 [開始→終了]の動画像となります。

★チェック有りのSE→ESはチェック無しの場合の2倍の長さで作成します。

